

BGStar®

Solución control normal BGStar®

IMPORTANTE: Lea esta información y la Guía del usuario que se incluye con su medidor de la familia BGStar® o MyStar® antes de utilizar las soluciones control BGStar®. Si necesita ayuda, llame al número de Atención al Cliente: 900 247 724.

RESUMEN

Las soluciones control BGStar® contienen una cantidad conocida de glucosa que reacciona con la tira reactiva BGStar® en combinación con las familias de medidores de glucosa en sangre BGStar® o MyStar® para garantizar que funcionen juntos adecuadamente. El procedimiento de prueba es igual al de una prueba con sangre, excepto que se utilizan las soluciones control BGStar® en lugar de una muestra de sangre. Los resultados de la prueba deben encontrarse dentro del intervalo de valores apropiado que figura en el envase de tiras reactivas BGStar® que está utilizando.

PRECAUCIÓN: Los resultados de las pruebas con solución control no reflejan su nivel de glucosa en sangre. El intervalo de la solución control es un intervalo de valores para la solución control únicamente. No es un intervalo de valores para su nivel de glucosa en sangre. Se utiliza para comprobar el funcionamiento del medidor y las tiras.

USO PREVISTO

Las soluciones control BGStar® se utilizan con las familias de medidores de glucosa en sangre BGStar® o MyStar® y las tiras reactivas BGStar® para garantizar que el medidor y las tiras funcionen juntos adecuadamente y para efectuar pruebas sin tener que usar su propia sangre. Debe realizar pruebas con solución control para cerciorar se de que los resultados de las pruebas sean exactos. El sistema también cumple con los requisitos adicionales para autocontrol.

Las pruebas con solución control deben realizarse cuando:

- Reciba el medidor por primera vez,
- Sospeche que el medidor o las tiras reactivas no están funcionando adecuadamente,
- Piense que los resultados de la prueba no son exactos,
- El medidor se haya caído, dañado o haya sido expuesto a líquidos,
- El médico o profesional sanitario se lo recomiende.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

Las pruebas con solución control se realizan de la misma forma que las pruebas de glucosa en sangre. Siga la Guía del usuario que se incluye con su medidor de la familia BGStar® o MyStar®.

Para mantener la exactitud, debe seguir estas pautas siempre que realice una prueba con solución control BGStar®:

- Asegúrese de que el medidor, las tiras reactivas y la solución control se encuentren a una temperatura de entre 10 °C y 40 °C.
- Agite energicamente la solución control antes de utilizarla.
- Deseche la primera gota de solución control y limpie el extremo del frasco.
- Coloque una segunda gota en una superficie limpia. Acerque el extremo de la tira reactiva a la muestra de solución control.

Consulte la Guía del usuario que se incluye con su medidor de la familia BGStar® o MyStar® para obtener una guía paso a paso más detallada acerca de cómo realizar la prueba.

RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados de la prueba con solución control BGStar® han de encontrarse, aproximadamente el 95% de las veces, dentro del intervalo de valores adecuado impreso en el envase de tiras reactivas BGStar® (a temperatura ambiente).

Si los resultados de la prueba con solución control no están dentro del intervalo de valores impreso en el envase de la tira reactiva repita la prueba. Los resultados fuera del intervalo pueden ser consecuencia de uno o varios de los siguientes factores:

- Solución control caducada o defectuosa.
- Tira reactiva caducada o defectuosa.
- Errores en la realización de la prueba.
- Solución control diluida con agua.
- Mal funcionamiento del medidor.
- Pruebas con la solución control llevadas a cabo fuera del intervalo de temperatura de funcionamiento del sistema de 10 °C a 40 °C.
- No haber agitado el frasco de solución control energicamente antes de usarlo.
- No haber desechado la primera gota de solución control ni haber limpiado el extremo del frasco.



<MAT519313

BGStar®
Solución control normal BGStar®

Para solucionar problemas, consulte las instrucciones que acompañan a su medidor de la familia BGStar® o MyStar®. Si necesita ayuda para identificar la razón de los resultados fuera de intervalo, llame al número de Atención al Cliente: 900 247 724.

PRECAUCIONES

Las soluciones control BGStar® son solamente para uso diagnóstico in vitro. Esto significa que son para probar su medidor y deben utilizarse solamente fuera del cuerpo.

- Use únicamente soluciones control BGStar® con los sistemas de monitorización de glucosa en sangre de la familia BGStar® o MyStar®.
- Compruebe la fecha de caducidad que figura en el frasco. No use la solución si ya ha caducado.
- Agite el frasco, deseche la primera gota de la solución control BGStar® y limpie el extremo del frasco para garantizar una buena muestra y un resultado exacto.
- Cuente 90 días a partir de la fecha en que abre un frasco nuevo de la solución control BGStar®. Esta es la fecha límite de uso una vez abierto el frasco. Anote la fecha límite de uso en el frasco de solución control BGStar® una vez abierto.
- No inhale ni ingiera la solución. Si accidentalmente ingiere solución control BGStar®, busque asesoramiento médico de inmediato.
- No añada agua ni ningún otro líquido a la solución control.
- Las pruebas con la solución control deben llevarse a cabo dentro del intervalo de temperatura de funcionamiento del sistema de 10 °C a 40 °C.
- Vuelva a colocar la tapa del frasco de la solución control inmediatamente después de usarla.
- Si tiene preguntas sobre las soluciones control BGStar®, llame al número de Atención al Cliente: 900 247 724.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Guarde las soluciones control BGStar® a una temperatura de entre 2 °C y 30 °C. No las refrigere. Mantenga la tapa bien cerrada y vuélvala a colocar en el frasco de solución control apropiado inmediatamente después de usar la solución.

COMPOSICIÓN DE LA SOLUCIÓN CONTROL NORMAL

Ingrediente activo: d-Glucosa 0,1%
Ingredientes inertes: 99,9%

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si no está totalmente satisfecho con este producto o si tiene alguna pregunta con respecto al uso de algún producto BGStar®, llame a nuestro número de Atención al Cliente: 900 247 724.

ADVERTENCIA: Tire la solución control no utilizada una vez transcurridos 90 días después de abrir el frasco.



Consulte las Instrucciones de uso



Limitación de temperatura



Fabricante



Producto sanitario para diagnóstico in vitro



Punto verde de reciclaje



No reutilizar



AgaMatrix, Inc.
7C Raymond Avenue
Salem, NH 03079
E.E.U.U.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Alemania

Distribuido por:
sanofi-aventis, S.A.
Josep Pla, 2
08019 - Barcelona