

## Visión global del medidor y de la tira reactiva

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.



SAP-Nummer  
Sprachvariante  
Erstellversion

519507  
084  
5  
15.04.2013 / Seim  
25.07.2013 / Perleth

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm

Farben: Black  Magenta   
Cyan  Yellow   
Seite 1 Kontur

## Ajustar fecha y hora

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

### Botones del medidor:

▼ **Fecha ARRIBA**    ▲ **Fecha ABAJO**    ▼ **COMPROBAR**

[1] Cuando el medidor está

desactivado, mantenga pulsado el botón COMPROBAR para entrar en

el modo de ajustes.

Seleccione el formato de hora (12 h o 24 h) y pulse el botón COMPROBAR

para seleccionar.

Aparecerá el icono de ajustes (⚙️) con la hora parpadeando al lado del icono de la hora (🕒).

[2] Pulse el botón de la flecha ARRIBA o ABAJO para seleccionar el valor (parpadeante).

Pulse el botón COMPROBAR para confirmar.

Repita el paso [2], hasta que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente.

### Atención al Cliente:

**En caso de dudas contacte con la línea diabetestar:**

**900 247 724**

Fabricante:

Agamatrix, Inc., 7C Raymond Avenue, Salem, NH 03079 USA



*Ejemplo de ajustar la hora (parpadeante):*

ajustes.

[3] Mantenga pulsado el botón COMPROBAR para salir del modo de

<MAT>19507



SAP-Nummer 519507  
Sprachvariante 084  
Erstellversion 5  
Packmittel erstellt am 15.04.2013 / Seim  
Packmittel geändert am 25.07.2013 / Perleth

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm  
Farben: Black ■ Magenta ■  
Cyan ■ Yellow ■  
Seite 2 Kontur ■