

Obtener un resultado de HbA1c estimada (~HbA1c)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

Para obtener un resultado HbA1c estimada realice los siguientes pasos de forma ordenada:

- [1] Realizar un "Perfil"
- [2] Confirmar que el "Perfil" se ha realizado
- [3] Realizar la prueba de la glucosa en sangre en "ayunas" cada día durante los 6 días siguientes al de la realización del "Perfil"

[1] Realizar un "Perfil"

Un perfil consiste en 7 mediciones de la glucosa en un día.

- Realice 7 pruebas de la glucosa en sangre utilizando la planificación del "Perfil".

Horario del perfil

Número de medición del Perfil	Etiqueta
1. Ayunas (6:00-8:59)	Ayunas
2. Después del desayuno (9:00-11:59)	Después de comer
3. Antes de comer (12:00-15:59)	Antes de comer
4. Después de comer (16:00-18:59)	Después de comer
5. Antes de cenar (19:00-20:59)	Antes de comer
6. Después de cenar (21:00-23:29)	Después de comer
7. Hora de acostarse (23:30-23:59)	Sin etiqueta

[2] Confirmar que el "Perfil" se ha realizado

Activar el medidor presionando en el botón (). Aparecerá la pantalla "Libro de registro" () mostrando los resultados de las pruebas de glucosa en sangre más recientes. Presione el botón () dos veces hasta que vea la siguiente secuencia.



"Perfil" realizado

Si el mensaje "A2" aparece en pantalla, ha realizado con éxito el "Perfil" y ahora será necesario que registre 6 resultados de la prueba de la glucosa en sangre en ayunas (referido a la sección [3] Realizar la prueba de la glucosa en sangre en ayunas).

~HbA1c (termino equivalente utilizado en las figuras: ~A1c)



No se ha realizado el "Perfil"

Si el mensaje "A1" aparece, se refiere al "Perfil" Solución de problemas

SAP-Nummer 519506
 Sprachvariante 084
 Erstellversion 11
 Packmittel erstellt am 15.04.2013 / Seim
 Packmittel geändert am 28.06.2013 / Perleth

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm
 Farben: Black Magenta
 Cyan Yellow
 Seite 1 Kontur

Visualizar la HbA1c estimada (~HbA1c)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.





<NMT-519506

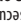
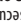
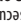
SAP-Nummer 519506
Sprachvariante 084
Erstellversion 11
Packmittel erstellt am 15.04.2013 / Seim
Packmittel geändert am 28.06.2013 / Perleth

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm
Farben: Black ■ Magenta ■
Cyan ■ Yellow ■
Seite 2 Kontur ■

[3] Realizar la prueba de la glucosa en sangre en "ayunas"

Una vez haya confirmado que el "Perfil" se realizó, realice una prueba de la glucosa en sangre en ayunas cada día durante los siguientes 6 días.
Realice una prueba en ayunas de la glucosa en sangre cuando no haya consumido ningún alimento ni bebida (excepto agua) por lo menos durante 6-8 horas (normalmente después de levantarse).
Etiquete con "ayunas" la prueba de la glucosa en sangre presionando el botón  del medidor hasta que  aparezca en pantalla.

Visualice sus resultados de ~HbA1c

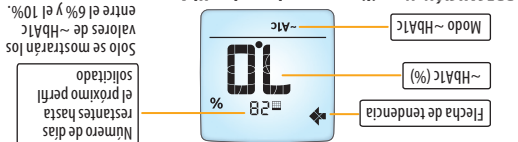
Active el medidor presionando el botón . La pantalla "libro de registro"  aparecerá mostrando los resultados de las mediciones de las pruebas de la glucosa en sangre más recientes. Presione el botón  dos veces hasta que vea la siguiente secuencia.

Si ha realizado suficientes pruebas de glucosa en sangre en ayunas, se mostrará en pantalla el resultado de ~HbA1c (ejemplo ~HbA1c)



Tomando muestras de la glucosa en sangre en ayunas cada día y realizando un "Perfil" cada 32 días.

Ejemplo: de pantalla ~HbA1c



PRECAUCIÓN: No utilice estos valores de ~HbA1c para tomar decisiones sobre el tratamiento. Cualquier cambio en el tratamiento debe realizarse consultando al médico.