

Visualizar el libro de registro (Resultados previos)

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.

Botones del medidor:



COMIDAS



FLECHA
ARRIBA



FLECHA
ABAJO



COMPROBAR

Visualizar el libro de registros:

- [1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROBAR para entrar en el libro de registros. Aparece el resultado más reciente.
- [2] Pulse los botones de las flechas ARRIBA o ABAJO para ver los resultados registrados.

Ejemplo:

Flecha de tendencia:

Indica si sus lecturas en ayunas tienen una tendencia al alza, a la baja o son estables.

Resultados de la prueba

Libro de registro (Modo)



Hora

Fecha

Etiqueta de la comida (aparece aquí)

Unidad de medida

Cómo cambiar las etiquetas de comidas desde el modo de Libro de registro:

[1] Pulse el botón Comidas. La etiqueta de comida de la lectura que está visualizando empezará a parpadear.

[2] Pulse el botón Comidas para visualizar las opciones de las etiquetas de comida. Pulse el botón COMPROBAR para confirmar.

SAP-Nummer
Sprachvariante
Erstellversion

519486
084
4
15.04.2013 / Seim
13.05.2013 / Seim

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm

Farben: Black  Magenta 
Cyan  Yellow 
Seite 1 Kontur 



Botones del medidor:

Visualizar las medias:

- [1] Cuando el medidor está desactivado, pulse el botón COMPROMBAR para activarlo. Se muestra el resultado más reciente.
- [2] Vuelva a pulsar el botón COMPROMBAR para entrar en el modo de medias.

Ejemplo:

[3] Pulse el botón de Comidas para ver las medias de:
 Todas las lecturas (sin ícono)
 Lecturas en ayunas
 Lecturas antes de comer
 Lecturas después de comer

Pulse los botones de las flechas ARRIBA o ABAJO para ver los diferentes números de días incluidos en la media:
 03 3 días
 07 7 días
 30 30 días

Modo de media
 Media calculada
 media
 Número de días utilizados en la media
 Etiqueta de la comida (si no hay ícono significa que se incluyen todas las lecturas)
 Unidad de medida
 mg /dL

Número de lecturas utilizadas en la media
 # 03

Visualizar las medias

Consulte la Guía del usuario de MyStar Extra® para las instrucciones de uso completas.



<MART519486

SAP-Nummer 519486
 Sprachvariante 084
 Erstellversion 4
 Packmittel erstellt am 15.04.2013 / Seim
 Packmittel geändert am 13.05.2013 / Seim

Abmessungen: (B x H) 76,2 x 101,6 mm
 Farben: Black ■ Magenta ■
 Cyan ■ Yellow ■
 Seite 2 Kontur ■